

AED設置手順書

～オムロンHDF-3500の設置方法～

Canon

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

設置時に必ず確認してください！

- 救急救命時以外は、除細動パッドパックを引き出さないでください。一度引き出すとパッドが未開封でも再利用できません。
- 救急救命時以外に除細動パッドパックを使用した場合、安心パックのサービス適用外となります。（別途有償で購入する必要があります）

救急救命時以外は、除細動パッドパックを引き出さないでください！



一度引き出すと、ケーブルを元に戻すことができません。

<理由>

- ・引き出したケーブルを無理やり元に戻した場合、パッドパックのケーブルが断線する可能性があります。
- ・この機種は「パッド導通チェック」機能が無いため、ケーブル断線の有無を確認できません。
(緊急時にAEDが使用できない危険性があります)

- ※パッド・ケーブルを引き出した状態でAEDを保管することはできません。
(メーカーが定める保管方法ではないため、緊急時にAEDを正しく使用できない危険性があります)
- ※迅速にAEDを使用して頂くための製品仕様です。


開梱

開梱


- 外箱を開けて、内箱と安心パック登録書類を取り出します。





HDF-3500の外箱

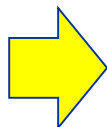

外箱を開けます。

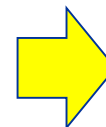

内箱と安心パック登録書類一式を取り出します。

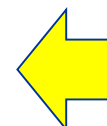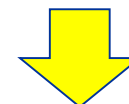

<内箱の内容>



- ・AED本体 ×1
- ・キャリングケース ×1
- ・除細動パッドパック(成人用) ×1
- ・AED救急セット ×1
- ※救急セットはキャリングケースに収納されています。
- ・付属書類一式

<安心パック登録書類一式>

- ・AEDお客様情報登録用紙
- ・AED安心パック登録申込書
- ・AED安心パック利用説明書
- ・AED安心パック加入シール
- ・パッドパック用シール
- ・ご注意(パッドパック注意書き)
- ・パッドパック用注意喚起シール

開梱

- 内箱を開けてAED本体と付属品を取り出します。

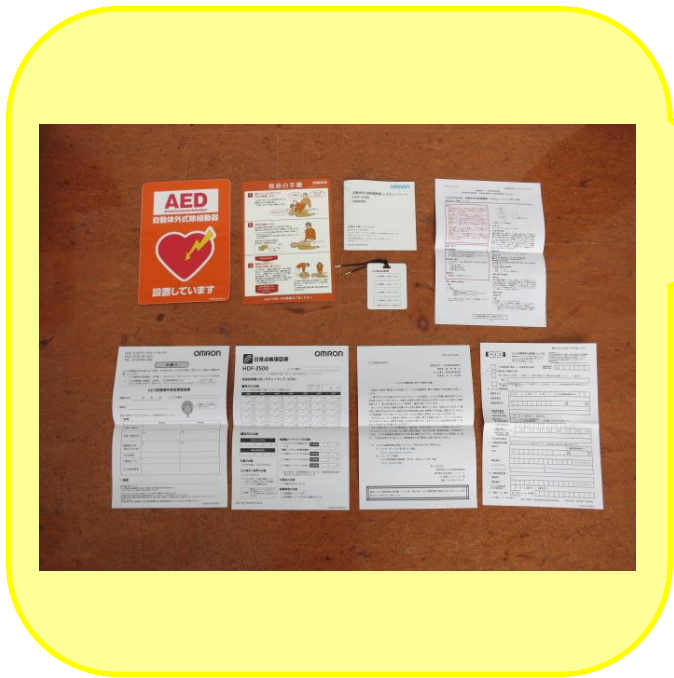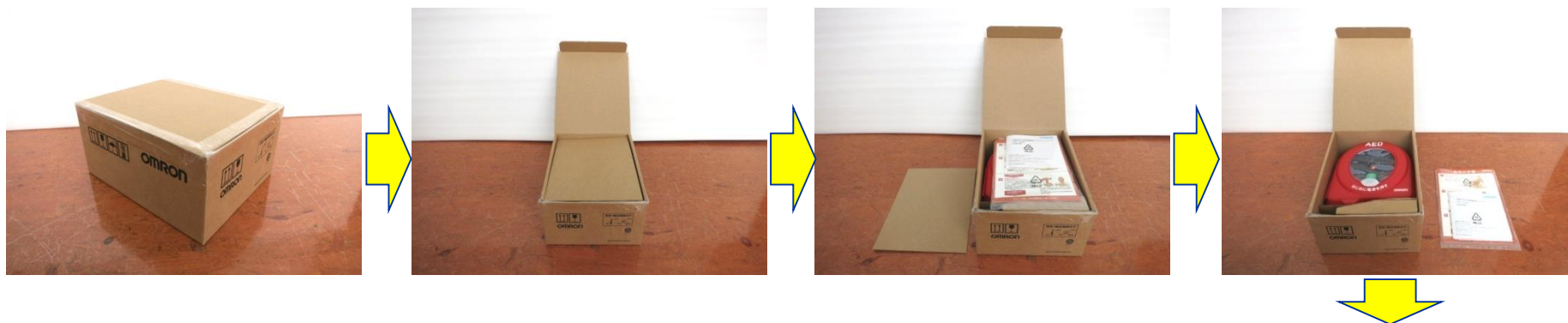

製品に付属しているパッドは1つです。
(予備パッドは付属していません)

- 梱包物を確認します。

	梱包物	数量	チェック
1	AED本体	1	
2	除細動パッドパック（成人用）※バッテリー一体型	1	
3	キャリングケース	1	
4	救急セット ※キャリングケースに収納されています。	1	
5	AED設置サインシール	1	
6	付属書類一式 ※次ページ参照	1	
7	AED安心パック（成人用）登録用紙一式	1	
8			
9			
10			
11			

※製品に付属している除細動パッドパックは1つです。（予備パッドは付属していません）

AED本体の付属書類

- 付属書類を確認します。


	梱包物	数量	チェック
1	救命の手順/HDF-3500使い方	1	
2	AEDサインシール（B5片面サイズ）	1	
3	添付文書	1	
4	取扱説明書（最終ページに保証書があります）	1	
5	消耗品交換時期表示ラベル（タグ）	1	
6	AED設置情報に関する登録のお願い （日本救急医療財団）	1	
7	AED設置情報の登録書（AEDマップ登録用）	1	
8	日常点検項目表	1	
9	AED設置場所等変更登録票	1	
10			
11			
12			



AED安心パック（成人用）の付属書類

- 付属書類を確認します。


	梱包物	数量	チェック
1	AED安心パック（成人用）利用説明書	1	
2	AED安心パック（成人用）登録申込書	1	
3	除細動パッドパック救命使用連絡のお願い	1	
4	AEDお客様情報登録用紙 ※4枚複写	1	
5	ご注意 ※パッドパックの注意書き（コーションシート）	1	
6	AED安心パック加入シール	1	
7	パッドパック用注意喚起シール	1	
8			
9			

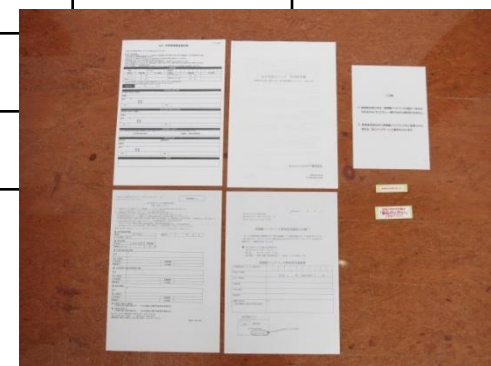

AED安心パックに付属されている書類



AED安心パック
登録書類一式の封筒

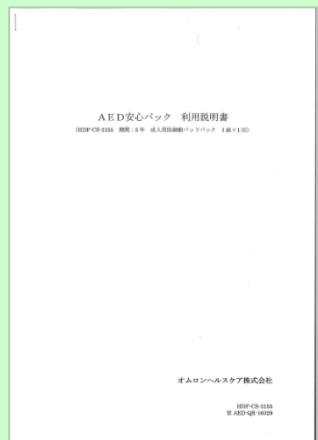

AED安心パック (成人用)
利用説明書




AED安心パック (成人用)
登録申込書




除細動パッドパック
救命使用連絡のお願い



お客様情報登録用紙
(4枚複写)

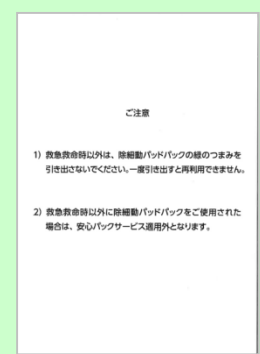

ご注意 ※パッドパックの注意書き
(コーションシート)

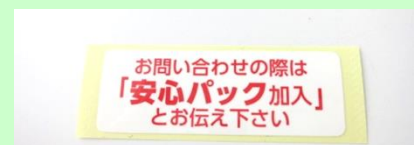

AED安心パック
加入シール

セットアップ° (AED本体)

電極パッドの接続

電極パッドと本体を接続します

- 内箱から電極パッドを取り出します。



電極パッド

※上記写真のように「予備用」と表記されていますが、本体装着用のパッドです。（予備パッドは付属していません）

- 内箱からAED本体を取り出します。キャリングケースから本体を取り出します。
- 電極パッドを取り付けます。「カチッ」というまでしっかり挿入してください。



電極パッド取り付け時注意事項

設置時に重要です！

- 救急救命時以外は、除細動パッドパックを引き出さないでください。一度引き出すとパッドが未開封でも再利用できません。
- 救急救命時以外に除細動パッドパックを使用した場合、安心パックのサービス適用外となります。（別途有償で購入する必要があります）

救急救命時以外は、除細動パッドパックを引き出さないこと！



一度引き出すと、ケーブルを元に戻すことができません。

<理由>


- ・引き出したケーブルを無理やり元に戻した場合、パッドパックのケーブルが断線する可能性があります。
- ・この機種は「パッド導通チェック」機能が無いため、ケーブル断線の有無を確認できません。
(緊急時にAEDが使用できない危険性があります)

※パッド・ケーブルを引き出した状態でAEDを保管することはできません。
(メーカーが定める保管方法ではないため、緊急時にAEDを正しく使用できない危険性があります)

※迅速にAEDを使用して頂くための製品仕様です。

AED本体の動作確認

- AED本体に電極パッドを取り付けた後本体インジケータが緑色に点滅することを確認します。

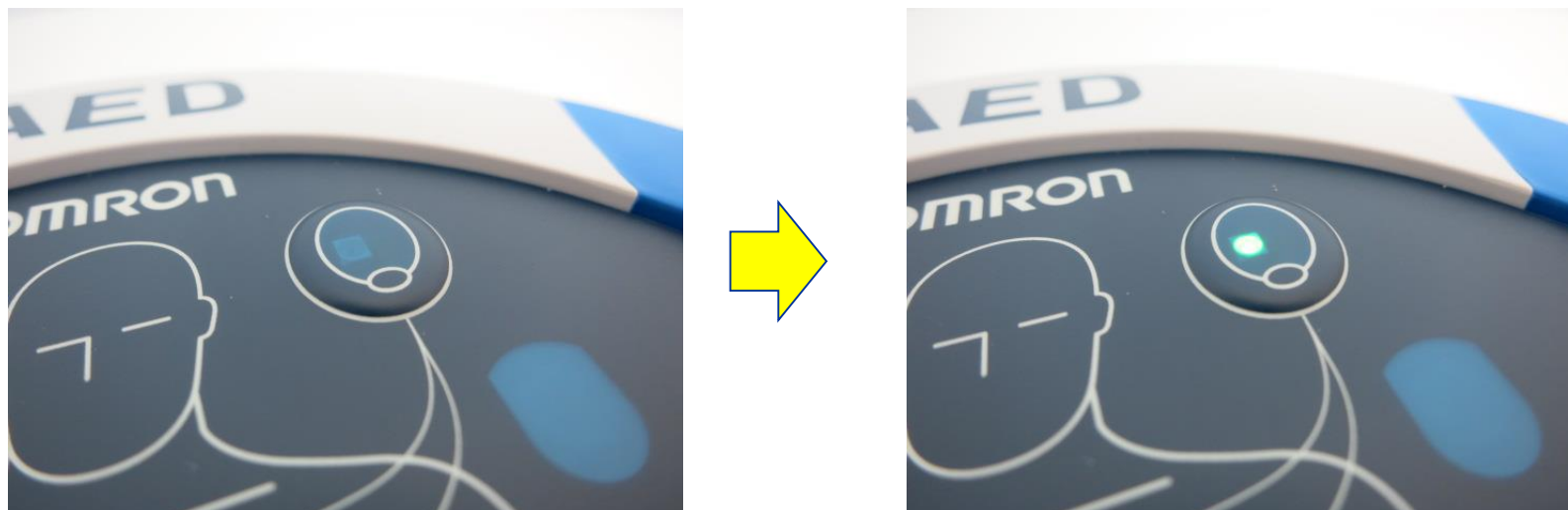

<注意>




10秒以上経過しても本体インジケータが緑色に点滅しなければ、再度電極パッドを装着し直してください。数回繰り返しても緑色に変わらない場合は、メーカーへ連絡してください。

【 オムロンAEDカスタマーサポートセンター 】

フリーダイヤル : 0120-401-066


消耗品交換時期表示ラベル（タグ）の記入

- 除細動パッドパックの裏面に貼ってある下側のシールを1枚はがし、消耗品交換時期表示ラベルに貼ります。

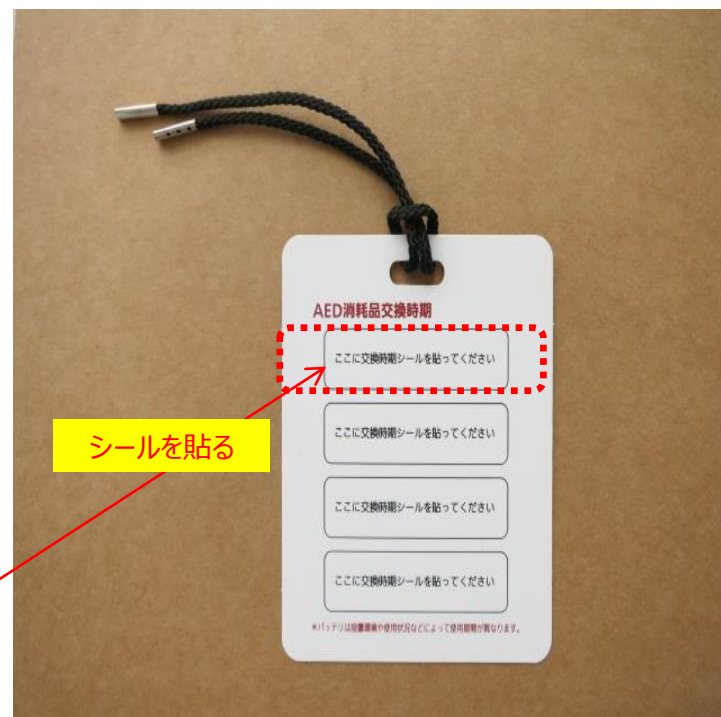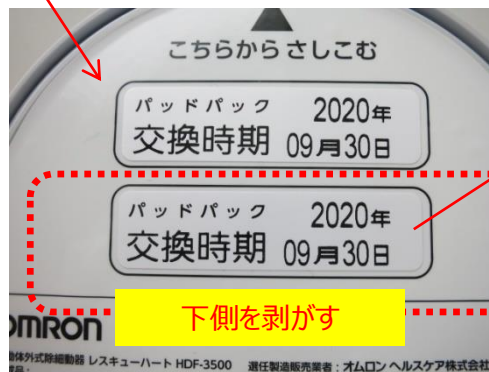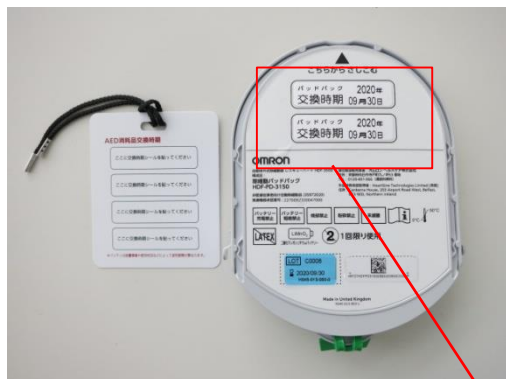

消耗品交換時期表示ラベル（タグ）裏面

- 「安心パック加入シール」を、消耗品交換時期表示ラベル裏面に貼ります。
- 空いたスペースに販売店名「キヤノンマーケティングジャパン（株）」と記入してください。

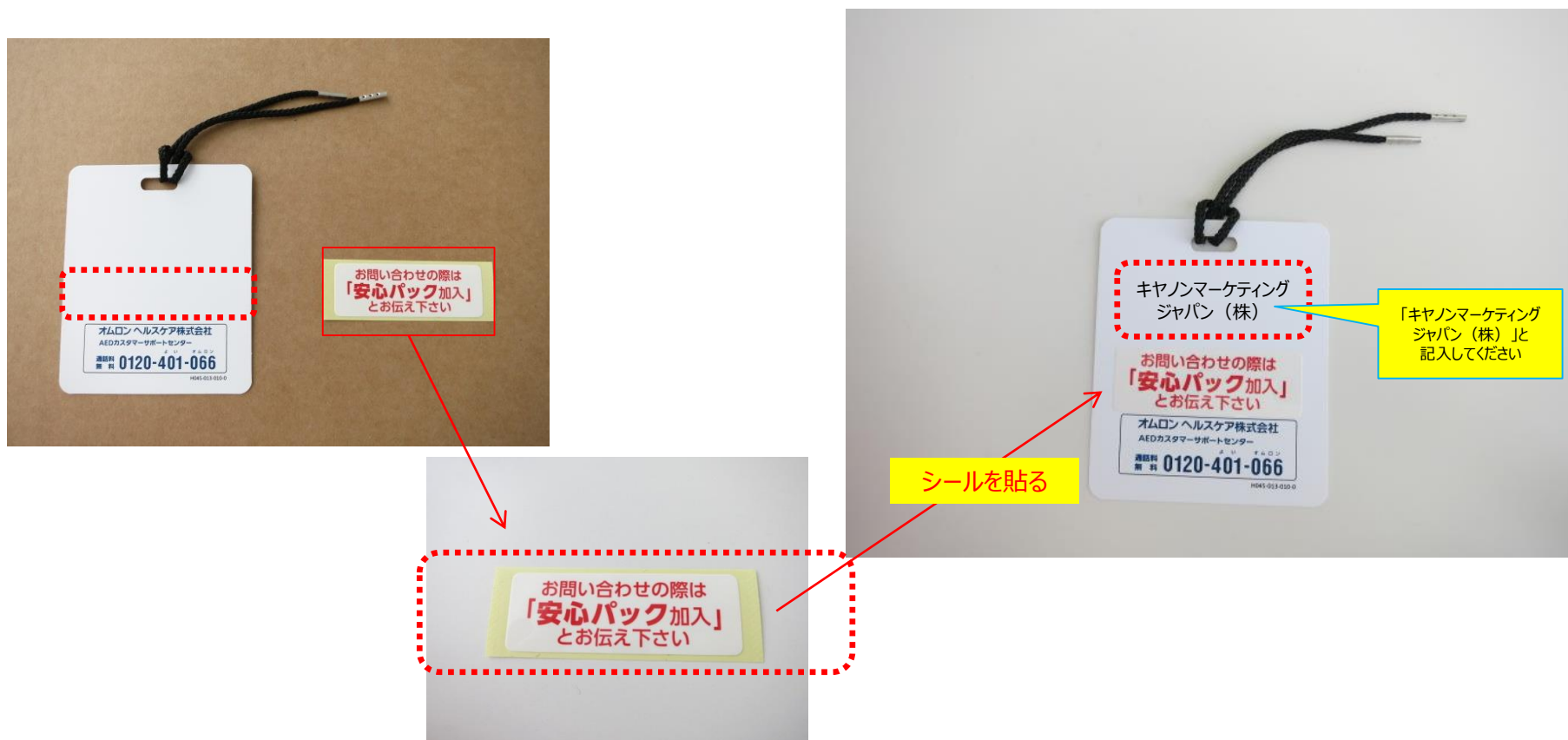



キャリングケース背面の
チャックを開けます



救急セットが収納されていること
を確認します。

消耗品交換時期表示ラベル（タグ）の取り付け **Canon**

- 消耗品交換時期表示ラベル（タグ）をAED本体に取り付けます。
※タグ裏面には「安心パック加入」とお伝えくださいますのシールが貼ってあります。



パッド交換時期が見えるように左側に寄せる

【注意】

- ・キャリングケース持ち手部分に取り付けてください。
- ・電極パッドの交換時期が見えるように本体左側に取り付けてください。
- ・タグは表面（消耗品交換時期の記載面）が見えるように取り付けてください。



表面



裏面

- ・使用期限シール
- ・販売店名
- ・安心パック加入シール

書類の記入

保証書（お客様保管用・任意）

● 設置先のお客様情報の記入

品質保証書


このたびは、本製品をお買い求めいただき、ありがとうございました。製品は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、お買い上げ後、保証規定に定めた期間は無償修理または交換いたします。

※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

以下につきましては、必ず取扱店にて、記入捺印していただいでください。

販売名 自動体外式除細動器 レスキューハート HDF-3500 機番 _____ ご芳名 _____ ご住所 _____ TEL () _____	お買い上げ店名 _____ 住所 _____ TEL () _____ お買い上げ年月日 年 月 日
--	--

選任製造販売業者
オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

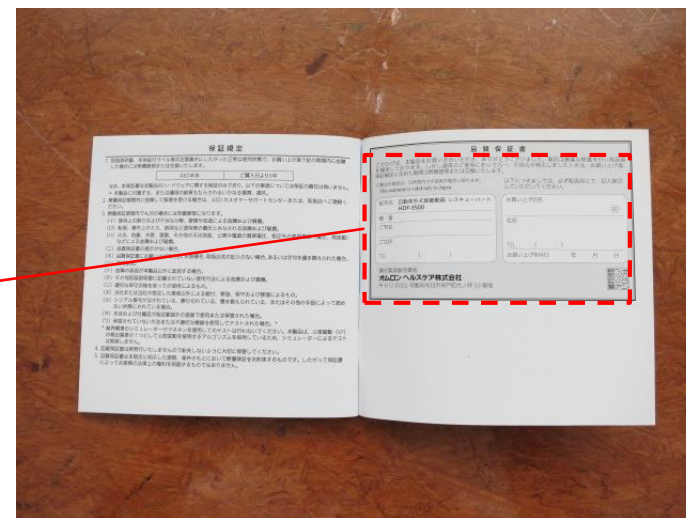

項目名	記入する内容
販売名	※出荷時に機種名が印刷されています。
機番	AED本体のシリアルNo.を記入。
ご芳名	設置先のお客様情報（会社名、営業所名）を記入。
ご住所	設置先のお客様の住所を記入。
TEL	設置先のお客様の電話番号を記入。

項目名	記入する内容
お買上げ店名	キヤノンマーケティングジャパン株式会社 オンラインショップ ※押印は不要です。
住所	東京都港区港南2-16-6
TEL	050-555-90058
お買上げ年月日	納品日を記入。

お客様情報登録用紙

AED お客様情報登録用紙

(メーカー控)

この度は、AED製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

◆ご購入の注意事項

- 本紙は、製品の保証書ではございません。お客様のAED設置情報の登録・管理、商品に関する情報提供、その他重要事項のご連絡などに使用するための登録確認書になります。
- ご購入いただいた情報は、オムロンヘルスケア株式会社ならび販売店が管理、使用させていただきます。
- 必要事項をご記入いただき、担当営業までご提出してください。
- すべての欄に正確にご記入いただけない場合は、適切な情報提供、ご連絡等ができない場合がございます。
- 本紙は、4枚複写になっておりますので、再紙を重ねて1枚目にご記入ください。兼任が併用と全てに複写されない場合がございます。
- なるべく強い責任でしっかりご記入ください。
- 本紙では、財団法人 日本救急医療財団への登録は行いません。別途、本体同封の「AED設置情報の登録書」をご使用ください。

製品情報															
型番	HDF-3500			製造番号	1	6	H	1	2	3	4	5	6	7	8
消耗品	交換時期	ロット番号	消耗品	交換時期	ロット番号										
パッドパック	2020年 4月	C0001	小児パッドパック	2020年 4月	C0001										
予備パッドパック	年 月		予備小児パッドパック	年 月											

※パッドパックの交換時期シールを同梱の「AED消耗品交換時期表示ラベル」に貼り付けたください(取扱説明書参照)
例) 設置年月日が2016年3月1日の場合、設置日から1日引いた年月を記入⇒2016年2月となります

設置年月日	2016	年	8	月
-------	------	---	---	---

● お客様情報登録用紙

- メーカーへの顧客情報登録に必要です。
- 複写式 (4枚)
 - メーカー控
 - 販売店控①
 - 販売店控②

キヤノンオンラインショップで 購入のお客様は登録不要です

お
部
住
お
部
住
AED

お客様 (購入者様) 設置先 (実際の設置施設)

販売店記入欄			
販売店名	(株) □□□□事務機	営業拠点名	□□□支店
部署名	営業本部 1課		
住所	〒 XXX-XXXX △△△県 都・道 府・県 △△市△△△1-1-1		
TEL	XX-XXXX-XXXX	FAX	XX-XXXX-XXXX
備考欄			

AED安心パック登録申込書

オムロンAEDカスタマーサポートセンター 行
FAX: 0120-596-606

お客様登録シート

AED安心パック登録申込書
型番 HDF-CS-3155

1. 登録申したいだく情報（以下「登録情報」といいます）に関するお問合せ先は下記の通りです。
オムロンAEDカスタマーサポートセンター tel: 0120-401-066

2. 登録情報には個人情報が含まれており、当個人情報には次の通り取り扱いします。
(1) AED安心パックのサービス提供及びアフターサービスに関する案内に利用いたします。
(2) 管理状況が適切であることを確認の上、緊急保持義務を課した委託先へ委託することがあります。
(3) 当個人情報に関するご要望（開示、訂正（追加・削除）、消去、利用停止、第三者提供停止、利用目的の開示）の連絡窓口は、下記の通りです。
オムロンAEDカスタマーサポートセンター tel: 0120-401-066 / fax: 0120-596-606
(4) 当個人情報に関する苦情ご相談につきましては、下記宛先にお問合せください。
オムロンヘルスケア株式会社（個人情報保護推進事務局（個人情報保護管理室代理）） tel: 0120-066-041

3. 本申込書により申し込みをされる場合、別紙「AED安心パック利用説明書」に同意したものといたします。

本書の各項目をご記入の上、オムロンAEDカスタマーサポートセンターまでFAXにてご送付ください。

■ AED本体製品情報

機種名	HDF-3500	納入日	年 月 日
シリアル番号	[SN]		

■ 消耗品情報

消耗品名	ロットNo	LOT	使用期限
除細動パッド/パック			年 月

■ お客様（購入者様）情報

住所	〒 -		
法人・団体名			
ご担当者名		所属部署	
電話番号	-	FAX番号	-

■ AED設置先(実際の設置施設)情報

住所	〒 -		
法人・団体名			
ご担当者名		所属部署	
電話番号	-	FAX番号	-

■ 販売店情報

住所	〒 -		
法人・団体名			
ご担当者名		所属部署	
電話番号	-	FAX番号	-

■ 登録完了通知のご連絡先
 お客様（購入者様）情報と同じ AED設置先(実際の設置施設)情報と同じ

■ 消耗品のお届け先
 お客様（購入者様）情報と同じ AED設置先(実際の設置施設)情報と同じ

オムロンヘルスケア株式会社 AEDカスタマーサポートセンター
TEL: 0120-401-066 FAX: 0120-596-606
営業時間: 月曜日～金曜日（祝日、祭日を除く）AM9:00～PM5:30

管AED-OR-18031

- AED安心パック登録申込書
- メーカーへのFAX登録が必須です。
未登録の場合、AED安心パックサービスの提供がされない可能性もございますので、ご注意ください。


※原本をお客様にて保管しておいてください。

AED設置情報の登録書（AEDマップ登録用）

- 郵送の場合：お客様自身で記入して郵送。
- Web登録の場合：未記入（お客様自身で専用URLから登録）

2017年10月以降

登録方法

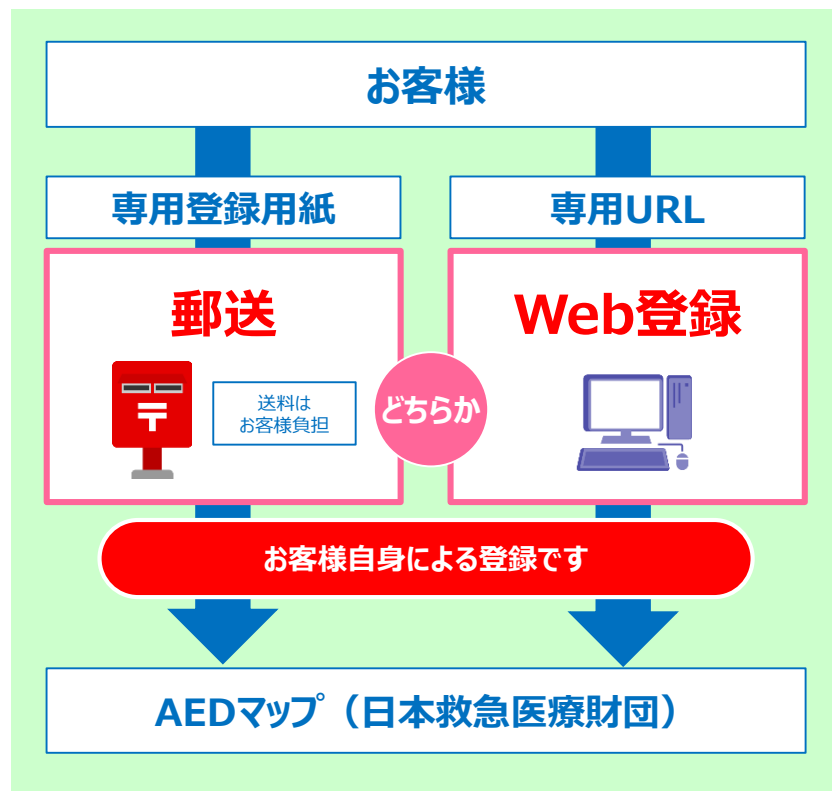

<登録用URL>

<https://qqzaidanmap.jp/aedreg>

<郵送先>

〒113-0034
東京都文京区湯島3-37-4 HF湯島ビルディング7F
一般財団法人 日本救急医療財団
AEDマップ登録係

登録は任意となりますが、AED普及状況の調査のために非公開でも登録にご協力ください。

※メーカー、キヤノンMJでは登録作業は代行していません

添付文書、その他の確認事項

添付文書の確認事項

● 添付文書

- 添付文書の赤枠内を必ずお読みください。

2016年1月(第1版) 医療機器承認番号 22700B2I00047000

機械器具 12 理学診療用器具
高度管理医療機器 非医療従事者向け自動除細動器 (35972020)

特定保守管理医療機器 自動体外式除細動器 レスキューハート HDF-3500
再使用禁止 (電極パッドのみ)

【警告】

患者の胸部が水分、汗、油分等により濡れている場合は、体表面を拭き取り、電極パッドを体表面にしっかりと密着させ除細動を行うこと。[電極パッドが体表面に密着できず、火傷(やけど)の恐れがある。]

2枚の電極パッドの間には最低2.5cmの距離があり、互いに触れないようにすること。[動作不良の恐れがある。]

除細動を行うときは、患者の胸部に貼付してある薬剤を全て取り除くこと。[患者が火傷(やけど)を負う恐れがある。]

除細動を行うときは、操作者及び周囲の人は、必ず患者から離れること。[放電エネルギーにより電撃を受ける恐れがある。]

患者に装着されているECG電極や、リード線、粘着テープなどに電極パッドが接触しないようにすること。[意図しない経路に電流が流れる恐れがある。]

除細動パッドバックの使用期限の切れたもの、電極パッドの袋が破れていたり、ゲルが乾燥していたり、その他破損が認められるものは使用しないこと。[火傷(やけど)又は動作不良の恐れがある。]

除細動パッドバック装着態

【禁忌・禁止】

併用医療機器

一人用又は多人数用高圧酸素患者治療装置内では使用しないこと。[爆発又は火災を起こす危険がある。]

可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素雰囲気内では使用しないこと。[爆発又は火災を起こす危険がある。]

適用対象 (患者)

以下の兆候の1つ或いは複数が認められる患者には使用しないこと。

- 反応がある患者
- 自発呼吸がある患者
- 脈拍が触知できる患者

使用方法

除細動パッドは再使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

(1) 本体

(2) 付属品

- 除細動パッドバック HDF-PD-3150
- ※特定保守管理用除細動パッドバック HDF-PD-3350
- 除細動パッドバック HDF-PD-3550

ただし、商品には必ずしも上記すべての除細動パッドバックが含まれるわけではない。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は粘着性電極パッドを介して電気ショックを供給することにより、突然の心停止 (SCA)の患者の除細動を行う非医療従事者向け自動除細動器である。粘着性電極パッドを介して得られる心電図 (ECG)を自動解析し、除細動ショックの要否を判定し、供給すべきタイミングを操作者に知らせる。ショックボタンが押下されると、電気ショックが患者に供給される。

【使用方法等】

<使用方法>

1. 保管

(1) 除細動パッドバックを袋から取り出す。

(2) 本体のパッドバック装着部に、除細動パッドバックを挿入し、カフアップするまでしっかりと押し付け装着する。

※救急現場への使用が予想される場合は、未経年専用除細動パッドバック HDF-PD-3350を装置の近くに保管しておくこと。

レスキューハート HDF-3500添付文書

【警告】

- 患者の胸部が水分、汗、油分等により濡れている場合は、体表面を拭き取り、電極パッドを体表面にしっかりと密着させ除細動を行うこと。[電極パッドが体表面に密着できず、火傷(やけど)の恐れがある。]
- 2枚の電極パッドの間には最低2.5cmの距離があり、互いに触れないようにすること。[動作不良の恐れがある。]
- 除細動を行うときは、患者の胸部に貼付してある薬剤を全て取り除くこと。[患者が火傷(やけど)を負う恐れがある。]
- 除細動を行うときは、操作者及び周囲の人は、必ず患者から離れること。[放電エネルギーにより電撃を受ける恐れがある。]
- 患者に装着されているECG電極や、リード線、粘着テープなどに電極パッドが接触しないようにすること。[意図しない経路に電流が流れる恐れがある。]
- 除細動パッドバックの使用期限の切れたもの、電極パッドの袋が破れていたり、ゲルが乾燥していたり、その他破損が認められるものは使用しないこと。[火傷(やけど)又は動作不良の恐れがある。]

【禁忌・禁止】

併用医療機器

- 一人用又は多人数用高圧酸素患者治療装置内では使用しないこと。[爆発又は火災を起こす危険がある。]
- 可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素雰囲気内では使用しないこと。[爆発又は火災を起こす危険がある。]

適用対象 (患者)

- 以下の兆候の1つ或いは複数が認められる患者には使用しないこと。
 - 反応がある患者
 - 自発呼吸がある患者
 - 脈拍が触知できる患者

使用方法

- 除細動パッドは再使用しないこと。

HDF-3500の使い方

● AED使用方法

- 付属の「救命の手順／HDF-3500の使い方」に沿って使用方法をご確認ください。

救命の手順 OMRON

JRC(日本製)ガイドライン2010

1 倒れている人がいたら、意識(反応)を確認します。
「大丈夫ですか?」と大声で呼びかけても意識がなければ応答を呼び、119番とAEDの手配をお願いします。

119番を! あなたはAEDを!

大丈夫ですか?



2 呼吸を確認します。
胸と腹部の膨れを素早く(10秒以内)見ます。いつも通りの呼吸でなければ、「呼吸無し」と判断します。
呼吸がなければ、下記図①の姿勢で横に寝かせ、救急隊を待ちます。



呼吸がなければ

3 胸骨圧迫を行い、血液を全身に送ります。
ひじを伸ばし、臍直に体重をかけ、少なくとも深さ5cm以上が沈みこむように、1分間に少なくとも100回のアンボで強く速く胸を押します。(AEDが到着するまで)




AEDが到着したら、AEDの音声ガイドに従います。

人口呼吸ができる場合は、胸骨圧迫30回、人口呼吸2回のサイクルの繰り返しを行う。人口呼吸ができないか、ためらわれる場合は胸骨圧迫のみを行う。

AEDの使い方は裏面をご覧ください

自動体外式除細動器 レスキューハート HDF-3500の使い方

1 [電源]ボタンを押します
◎念のため、「反応・呼吸の再確認」をしてください。




スタンバイ表示が緑色に点滅していることを確認してください

これより以下、音声ガイドに従って操作してください。

2 電極パッドを貼ります

- ・線のつまみを引っ張り、パッドの袋を引き出します。
- ・袋を開けて、中からパッドを取り出します。
- ・青い矢印を引く、パッドから裏のシートを剥がします。
- ・パッドを密着するように胸とわき腰に貼ります。


◎心電図を解析します。身体には触れないでください。
解析中は、誰も傷病者に触れていないことを確認してください。

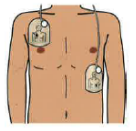

状 態	電気ショックが必要な場合	電気ショックが必要な場合
音声ガイド	「体から離れてください。電気ショックが必要です。」	「電気ショックは不要です。」

未就学児へ使用する場合
患者が未就学児の場合は、除細動パッドバックを装置から取り外し、未就学児専用除細動パッドバックを装着します。ただし、未就学児専用除細動パッドバックが近くにない、やむをえない場合には2枚のパッドが触れ合わないよう注意を払って、除細動パッドバックで代用してください。

3 [ショック]ボタンを押します
◎電気ショックが必要ないと判断された場合、[ショック]ボタンを押しても放電されません。



音声ガイド 「体から離れてください。オレンジ色のショックボタンを押してください。」
※この音声ガイド後、20秒以内に[ショック]ボタンを押してください。
「電気ショックを行いました。」

※その後、音声ガイドに従って、胸骨圧迫を行ってください。

普段通りの呼吸が続いた場合は、身体を横向きにして救急隊員の到着を待ちます。
(電極パッドは付けたままにしてください)

外国特許承認取得者: HeartSine Technologies Limited (英国) 選任製造販売業者: オムロンヘルスケア株式会社
TEL: 0120-401-066 (通話料無料)

● AEDの使用方法

1. 電源ボタンを押す。
2. 音声ガイドに従って操作。
2. 電極パッドを貼る
3. 心電図解析を待つ。
4. 電気ショックのボタンを押す。
5. 心肺蘇生を実施する。
6. 救急隊が到着するまで3～5を繰り返す。

※電気ショック不要と診断された場合でも心肺蘇生は実施してください。



緊急時以外
パッドは引き出さないこと

救命の手順／HDF-3500の使い方

お問い合わせ先

不具合や修理、操作方法などに関する問合せ

■ 故障や操作に関する問合せ

【問合せ先】

オムロンヘルスケア（株）

AEDカスタマーサポートセンター

フリーダイヤル：**0120-401-066**

対応時間：24時間365日対応

**AED本体
無償保証期間**

**納品日から
5年間**