

■アップグレード手順

【アップグレード中の注意事項】


- スキャナ、パソコンの電源を切ったり、ケーブルを抜かないでください。
アップグレード中に電源を切ったりケーブルを抜くと、スキャナの故障となり、部品交換が必要になります。
- 他のアプリケーションソフトを起動・動作させないでください。
- ノートパソコンの場合は、バッテリーではなく電源アダプタを使用してください。
- アップデート中にスタンバイ状態にならないような設定にしてください。

【操作手順】


1. DR-150 の給紙トレイを閉じて電源をオフにします。
2. DR-150 背面の AutoStart スイッチを OFF にします。
3. PC と DR-150 を USB ケーブルで接続し、DR-150 の給紙トレイを開いて電源を入れます。
4. PC のタスクトレイに常駐している CaptureOnTouch のアイコンをクリックし、表示されるメニューの「終了」を選択します。タスクトレイから CaptureOnTouch のアイコンが消えます。





CaptureOnTouch アイコン

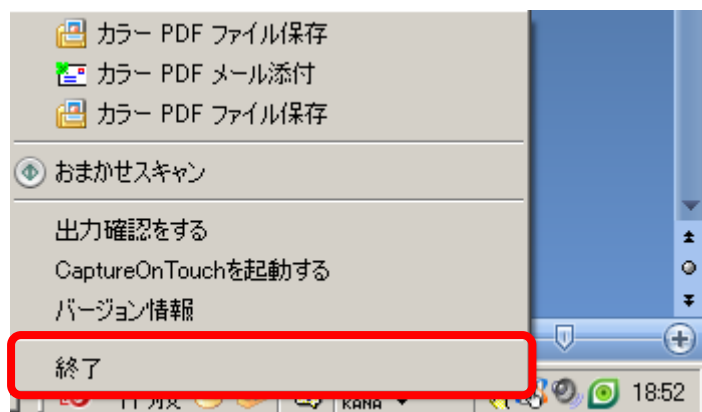

5. DR150_CaptureOnTouchLite_FirmUpdaterMain205_n14_OTL14.exe を実行します。

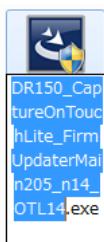

6. ファームウェアアップデートツールが起動しますので、使用許諾画面で「はい」を選択します。

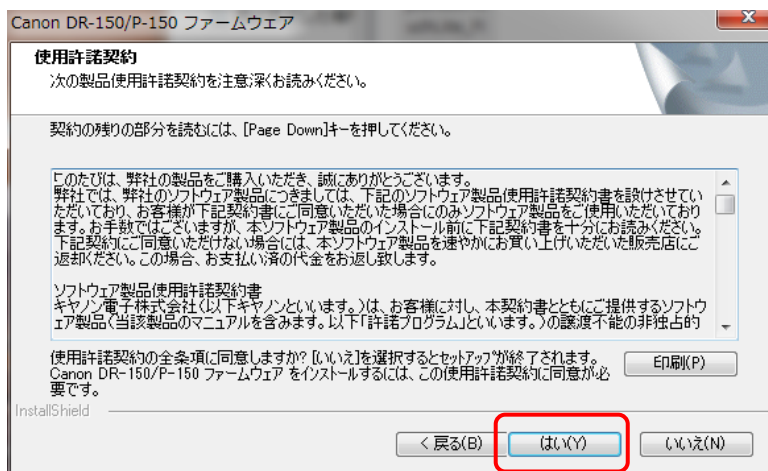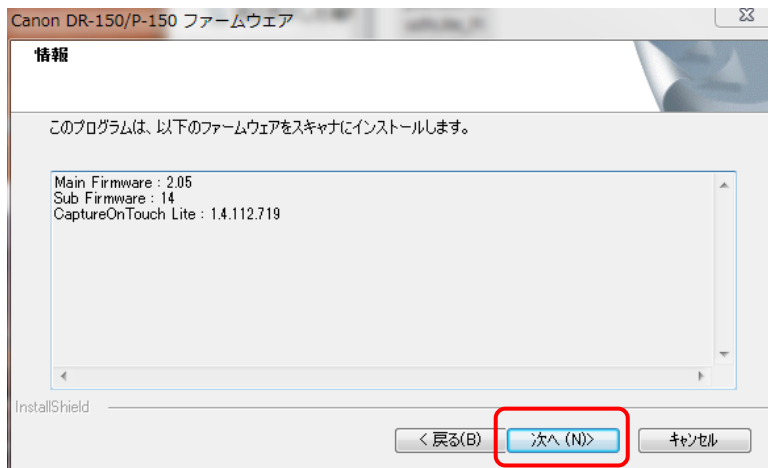


7. アップグレード時の注意事項画面で「次へ」を選択します。




8. アップグレード確認画面で「はい」を選択します。




9. アップグレード注意画面で「はい」を選択します。

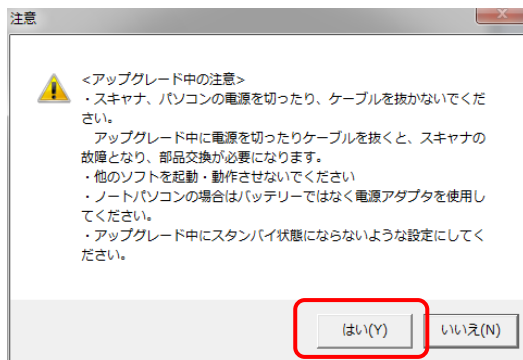

1 0. 注意画面が数秒間表示されます。

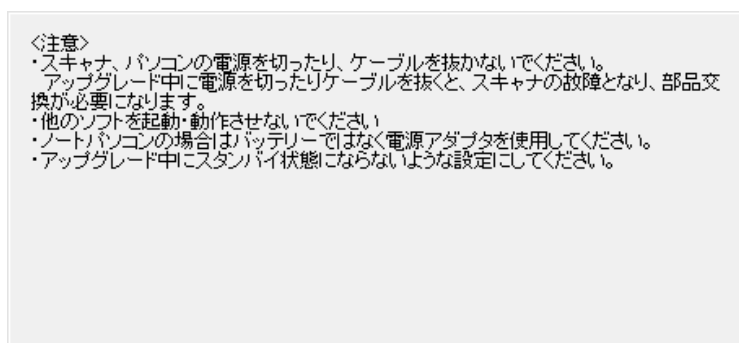


1 1. 自動的にアップグレードが開始されます。

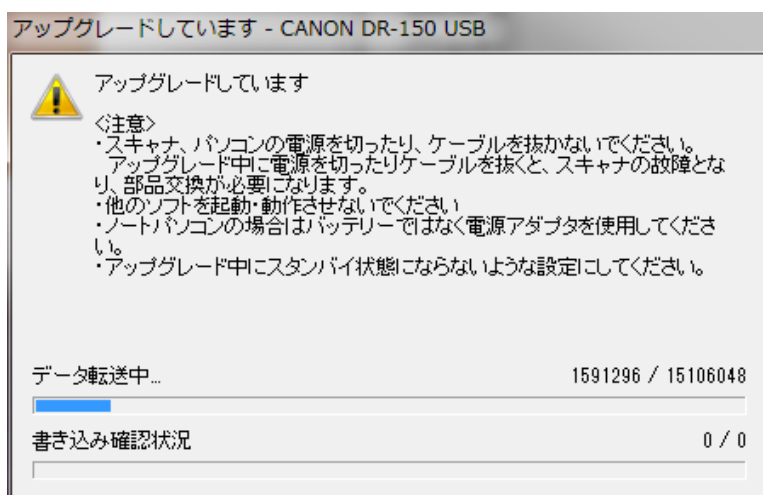

1 2. これにて終了です。「OK」を押下して、DR-150 と PC を接続する USB ケーブルを抜いて、電源を OFF してください。

この場面では給紙トレイを閉じても電源は OFF となりません。

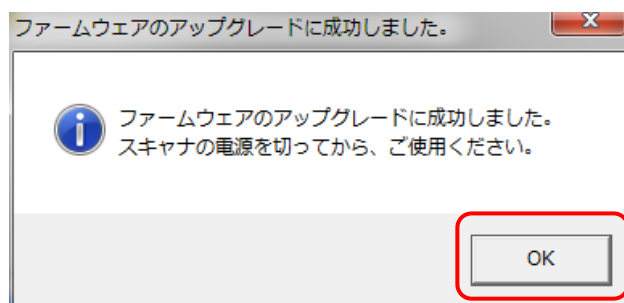

DR-150 と PC を接続する USB ケーブルを接続し、給紙トレイを開けて電源が ON となれば作業終了です。